




Befuktare PMH7000



Intensivvård • Befuktare PMH7000

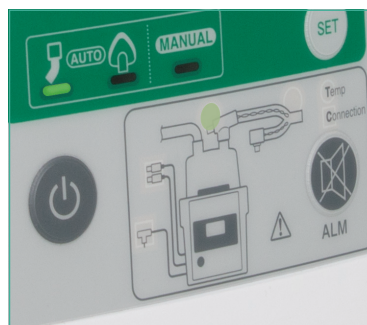

Intersurgical befuktare PMH7000

Befuktaren PMH7000 har funktioner som ger användaren fler möjligheter att behandla patienter med aktiv befuktning. Apparaten är utformad för att klinisk personal på egen hand skall kunna välja optimala inställningar för att uppnå rätt befuktning. Befuktaren är en plattform som ger stor flexibilitet i att välja andningssystem och tillbehör ur Intersurgicals omfattande sortiment av produkter för aktiv befuktning.

Ett urval av funktioner och fördelar:

- Enkelt och intuitivt gränssnitt för avancerad användning
- Användaren bestämmer själv vilken temperatur som visas på displayen
- Manuellt läge för att användaren själv skall kunna förinställa temperaturen på patientsidan och vid befuktningskammaren
- Läge *Default* väljer automatiskt de inställningarna som användes senast
- Alarmpanel som visar alarmets prioritet samt var i andningskretsen som det har utlösts
- Kabel med dubbla temperatursensorer ingår som standard i leveransen

▶ Video med installationshandledning finns på www.intersurgical.se

Låsknapp

För enkel montering eller borttagning av befuktningskammaren med enhandsgrepp

Värmeplatta

Med teknik som säkerställer att plattan endast värms upp om en befuktningskammare är monterad

Display

Valmöjlighet att visa temperaturen vid kammaren eller temperaturen vid patienten

Val av läge

Tre olika lägen kan väljas av användaren; invasivt, noninvasivt och manuellt. Det manuella läget ger användaren möjlighet att själv ställa in olika temperaturer

Alarmpanel

Visar var i kretsen som alarmet har utlösts och dess prioritet





Befuktare PMH7000

Intersurgicals befuktare PMH7000 är fullt kompatibel och anpassad för användning tillsammans med Intersurgicals andningssystem och övriga tillbehör för aktiv befuktning. Det finns ett stort och varierat sortiment för intensivvård på vuxna, barn och neonatal. Varje befuktare levereras med en kabel med dubbla temperatursensorer vilket gör att den är komplett och redo att användas vid leverans. Kontakta Intersurgical för fullständig produktinformation och för att få en demonstration av apparaten.



Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
7000002	Befuktare PMH7000 inklusive temperaturkabel med dubbla temperatursensorer	1

Befuktningskammare

Intersurgicals befuktningskammare är en av komponenterna i andningskretsen som är direkt ansluten till befuktaren. Den används med PMH7000 och kan användas med andra befuktare som är vanligt förekommande inom intensivvård. Intersurgical har tre olika varianter av befuktningskammare; autopåfyllning, manuell påfyllning och lågvolymskammare. Alla varianter kan användas på olika patientgrupper för olika typer av andningsstödjande behandling, alltifrån CPAP till mekanisk ventilation inklusive HFO. Befuktningskammaren placeras enkelt med ett enhandsgrepp på värmeplattan. När temperaturen i kammaren stiger förångas vattnet och blir en del av det inspiratoriska flödet och befuktar patientens luftvägar. Intersurgicals befuktningskammare levereras antingen separat och eller som en ingående komponent i ett komplett andningssystem. I alla leveranser är befuktningskammaren styckförpackad.



2310000



2320000




23330000

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2310000 (S*)	Befuktningskammare med autopåfyllning	30 (30*)
2320000	Befuktningskammare manuell påfyllning, inklusive klämma	30
23330000	Befuktningskammare lågvolyms, manuell påfyllning, inklusive klämma	30

Kablar

Kablar för att ansluta andningssystem för aktiv befuktning till PMH7000 och för mätning av temperatur.

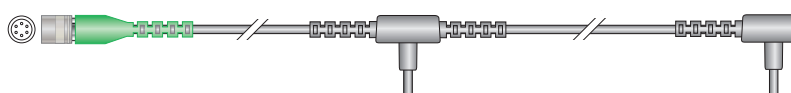

7700000



5600000



5601000

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
5600000	Kabel för anslutning av andningssystem med en uppvärmd slang	1
5601000	Kabel för anslutning av andningssystem med två uppvärmda slangar	1
7700000	Kabel med dubbla temperatursensorer	1




(S*) Lägg till ett S till det sjuiffigra artikelnumret för en steril version av produkten, t ex 5000000S (förpackningsstorlek för steril produktalternativ visas inom parentes).



Flextube™ andningssystem med värmetråd för aktiv befuktning


Välj mellan andningssystem med uppvärmning i den ena slangerna eller uppvärmning i båda slangarna. Det finns ett brett sortiment av system både med och utan ingående befuktningskammare.

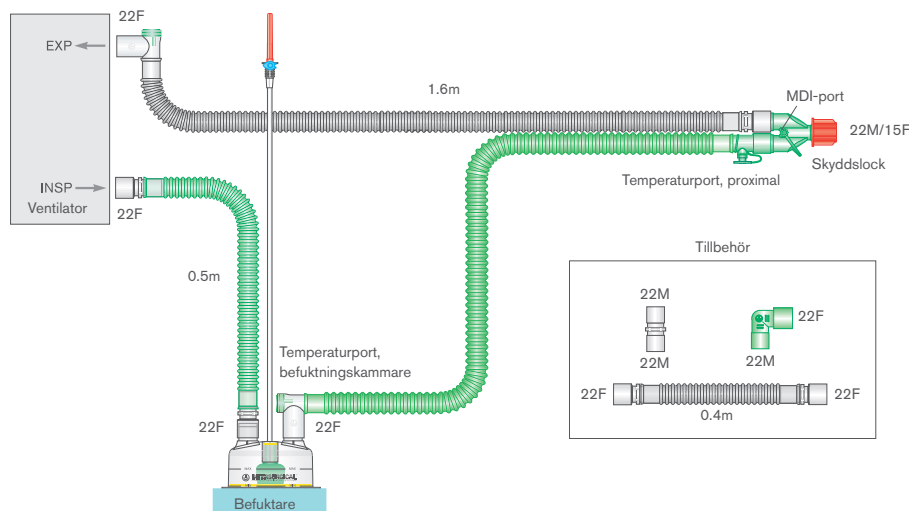

Andningssystem med två uppvärmda slangar

Andningssystemet på bilden

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2026000 (S*)	22mm andningssystem med två uppvärmda slangar, 1,6 m och apparatslang 0,5 m	10 (12*)
2026310 (S*)	22mm andningssystem med två uppvärmda slangar, 1,6 m och apparatslang 0,5 m, inklusive befuktningskammare med autopåfyllning	7 (6*)

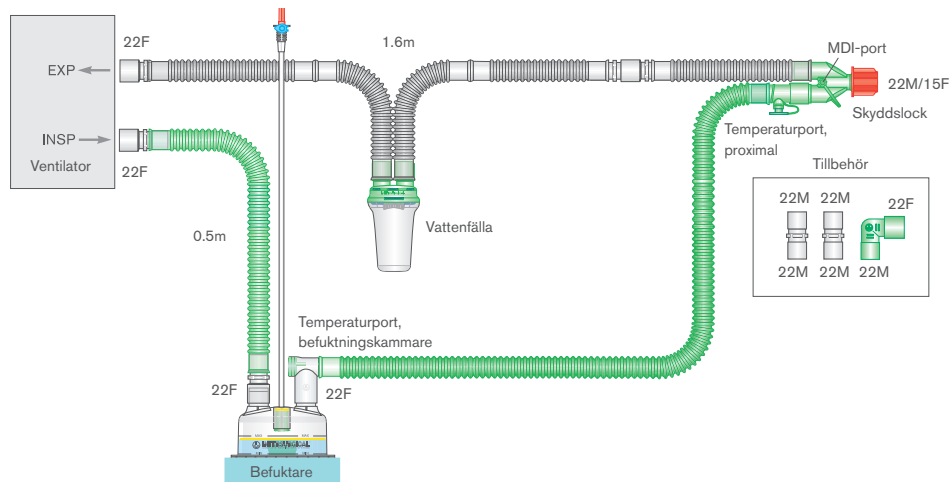

Andningssystem med enkel värmetråd

Andningssystemet på bilden

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackningsstorlek
2025000	22mm andningssystem med en uppvärmd slang och vattenfälla, 1,6 m och apparatslang 0,5 m	10
2025310 (S*)	22mm andningssystem med en uppvärmd slang och vattenfälla, 1,6 m och apparatslang 0,5 m, inklusive befuktningskammare med autopåfyllning	7 (5*)

Intersurgical har ett stort sortiment av andningssystem för aktiv befuktning som passar till vuxna, barn och neonatala patienter. Kontakta någon av Intersurgicals produktspecialister eller besök www.intersurgical.se för att få information om hela sortimentet.

S Sterilt alternativ (S*) Lägg till ett S till det sju-siffriga artikelnumret för en steril version av produkten, t ex 5000000S (förpackningsstorlek för sterilt produktalternativ visas inom parentes).



INTERSURGICAL
COMPLETE RESPIRATORY SYSTEMS

Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 and ISO 14001:2004



Please recycle

IS1.29 SE • Issue 4 05.17