




OroCare™

Behandlingsstrategi för munvård

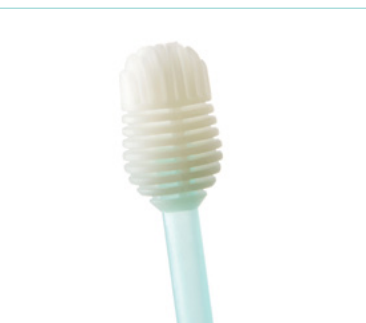

Motverka Ventilator Associerad Pneumoni



Minska VAP med munvård


Ventilator Associerad Pneumoni (VAP) orsakar förlängd intubation och en förlängd vistelse inom intensivvården och därmed ökade kostnader. VAP kan även leda till en högre mortalitet inom IVA.

En kombination av munvårdsbehandlingar (borstning och sugning) och ett munvårdsprotokoll innebär att vårdgivaren effektivt kan förhindra orofaryngeal bakteriell biofilmpuppbyggnad. Detta leder i sin tur till en minskning av VAP och aspirationspneumoni med resultat som minskade behandlingskostnader.^{1,2,3}




Fyra steg av placktillväxt

Dental plack är en biofilm som består av bakterier och deras utsöndringar. Plackets placering är framför allt längs tandköttskanten och mellan tänderna.

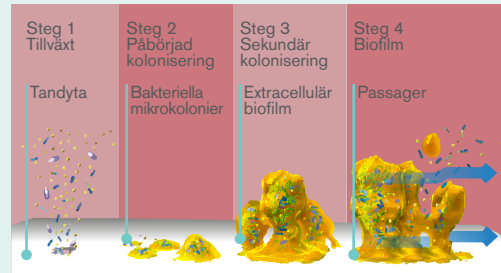


Biofilm

Biofilmen kommer att återuppbyggas efter varje ingrepp och kommer att täcka hela tandytan på bara två timmar. Biofilmen skyddar patogena bakterier som *MRSA* och *Klebsiella*, som är vanliga problem inom intensivvården. Biofilmen måste brytas upp före applicering av antibakteriella medel.

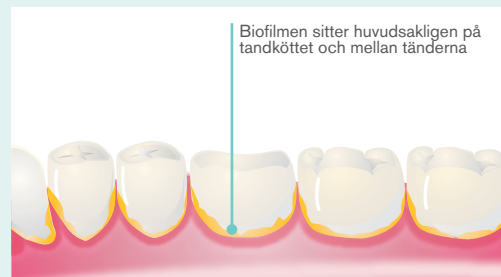

Aspiration

Från oropharynx kommer saliv, slem och biofilm som riskerar att rinna ner till ET-tubens kuff och orsaka aspiration ner i lungorna, då kuffen aldrig kommer att var 100% tät. Vid aspiration ner i lungorna kan dessa bakterier orsaka VAP och kräver i sin tur behandling med antibiotika.

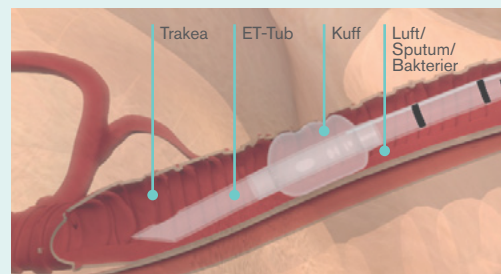

Utbildningsvideo

För ett korrekt handhavande av Intersurgicals munvårdsprodukter var god se utbildningsmaterial.



www.intersurgical.se/products/critical-care/oral-care#videos



www.intersurgical.se/info/oralcare

Referenser

1. R. GARCIA, L. JENDRESKY, L. COLBERT, A. BAILEY, M. ZAMAN et M. MAJUMDER Reducing Ventilator-Associated Pneumonia Through Advanced Oral-Dental Care: A 48-Month Study, AJCC, July 2009.
2. J. Rello, D. Ollendorf, G. Oster, M. Vera-Llonch, L. Bellm, R. Redman, M. Kollef: Epidemiology and outcomes of ventilator-associated-pneumonia in a large US database, Chest, December 2002.
3. L. Frampton: Preventing HCAI on the intensive care unit, The Clinical Services Journal, March 2014.



Munvårdsverktyg

För att på bästa sätt avlägsna plack rekommenderas ett munvårdsverktyg med mjukt bortshuvud. Intersurgical erbjuder ett stort antal medicinska munvårdsverktyg med mjuka borsthuvuden och rengöringsredskap för både vuxna och barn inom intensivvård. Munvårdsverktygen har utformats med små patientvänliga borsthuvuden som gör det möjligt för användaren att försiktigt och effektivt nå alla områden i munhålan.



OroCare™ Mini

Perfekt för patienter med utmanande orofaryngeal status. Den har en långsmal nacke som hjälper användaren med att nå alla områden i munhålan.



OroCare™ Select med 0.12% Klorhexidin

En ampull innehållande 0,12% klorhexidin ingår för att leverera den antibakteriella vätskan direkt vid borsthuvudet. Sugning kan enkelt kontrolleras av den integrerade tumpporten.



OroCare™ Aspire munvårdsverktyg med sugfunktion

Med inbyggd direktanslutning till sugslang elimineras behovet av ytterligare koppling. Den långsmala nacken hjälper användaren att nå alla delar av munhålan utan att äventyra ET-tub eller annan utrustning.



OroCare™ Sensitive munrengörare med sugfunktion

Denna unika Sensitive används för att rengöra känslig vävnad så som tandkött och slemhinna. Ett helgjutet mjukt huvud är en säkrare lösning jämfört med traditionella skumpinnar. Sensitive tillåter applicering av antibakteriell lösning samtidigt som tänder och vävnad blir rengjorda.

Produktkod	Beskrivning	Antal/Kolli.
301 1000	OroCare Mini tandborste	30
301 6000	OroCare Aspire munvårdsverktyg med sugfunktion	25
301 2100	OroCare Select sugtandborste med 0,12% klorhexident ampull	50
301 7000	OroCare Sensitive	15

Tillbehör

För att komplettera utbudet av munvårdsverktyg har Intersurgical utvecklat en rad tillbehör för att göra munvård mer effektiv och lättanvänd.



OroCare™ förgreningskoppling

Designad för att använda två sugslangar till samma sugkälla. Detta tillbehör kan bli nödvändigt när slutet sugsystem används samtidigt till en och samma sugkälla.



OroCare™ 0.12% klorhexidin ampull

Ampullerna innehåller en antibakteriell 0.12% klorhexidin lösning för användning med OroCare Select.



OroClean tandkräm

Engångsförpackad tandkräm. Denna förhindrar korskontaminering mellan patienter.

Produktkod	Beskrivning	Antal/Kolli.
3022000	OroCare förgreningskoppling	25
3025000	OroCare™ 0.12% klorhexidin ampull - 14 ml för användning av OroCare Select	70
3021000	OroClean tandkräm styckesförpackad, 2g	250



Munvårds-kit

För att underlätta införandet av ett munvårdsprotokoll finns det tre olika dygns-kit, behandling var 4 timma (q4) eller var 8 timma (q8). Det finns även två dygns-kit med klorhexidinlösning för användning var 4 timma (q4) eller var 8 timma (q8). Dessa dygns-kit erbjuder en smidig lösning av engångsverktyg för munvård.



3014100

Produktkod	Beskrivning	Antal/Kolli.
3014000	OroCare 24 timmars dygns-kit - q4 (behandling var fjärde timma)	10
3014001	OroCare 24 timmars dygns-kit - q4 (behandling var fjärde timma) utan munfuktare i skumgummi	10
3014100	OroCare 24 timmars dygns-kit med klorhexidin - q4 (behandling var fjärde timma)	10
3015000	OroCare 24 timmars dygns-kit - q8 (behandling var åttonde timma)	15
3015100	OroCare 24 timmars dygns-kit med klorhexidin - q8 (behandling var åttonde timma)	15

Behandlings-kit, engångs

För tillfällen där dygns-kit inte används kan Intersurgical erbjuda ett antal mindre behandlings kit för engångsbruk. Dessa produkter innehåller ett munvårdsverktyg, klorhexidin eller tandkräm samt OroCare Sensitive eller applikationssvamp på pinne för yttre munvård.



3016001



3016002



3016003



3016100

Produktkod	Beskrivning	Antal/Kolli.
3016001	OroCare Aspire munvårdsverktyg med sug, klorhexidin, behållare, läppfuktare	100
3016002	OroCare Aspire munvårdsverktyg med sug, klorhexidin, tandkräm, behållare, läppfuktare	100
3016003	OroCare munvårds-kit med klorhexidin och tandkräm, OroCare Aspire OroCare Sensitive med behållare	100
3016100	OroCare Aspire munvårdsverktyg med sug, tandkräm	25



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 and ISO 14001:2015

Please think before you print
Save energy and paper.
If you must print this Produktblad please print it double sided.