



Respi-Check™ Syrgasmasker med andningsindikator

Enkel övervakning av andningsfrekvens i realtid



Oxygen och aerosol ▪ Variabel syrgaskoncentration (lågflöde)



Respi-Check Syrgasmasker med andningsindikator

Andningsfrekvens ger en indikation av sjukdomens svårighetsgrad och är en markör för korrekt respiratorisk och metabolisk dysfunktion om den mäts noggrant. Att använda Respi-Check med andningsindikator är en enkel och kostnadseffektiv metod för att mäta andningsfrekvens med precision.


Varför mäta andningsfrekvens?

Andningsfrekvens ska alltid mätas på alla som behandlas med syrgas, oavsett om det är på grund av sjukdom, skada eller efter narkos. Trots det så monitoreras andningsfrekvensen oftast bristfälligt och mäts med uppskattningar utan noggrannhet.

Hur mäts andningsfrekvens med Respi-Check?

Respi-Check ger en exakt mätning av patientens andningsfrekvens i realtid. Andetaget förflyttar en synlig kula i ett genomskinligt plaströr som har integrerats i en högkoncentrationsmask för syrgas.

Flödet av syre i masken trycker bollen till toppen av röret. Minsta lilla negativa tryck orsakat av patientens inandning drar bollen till botten av röret, vilket gör att varje andetag blir synligt.

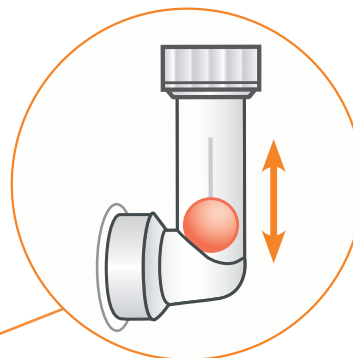

Respi-Check andningsindikator

Enkel och kostnadseffektiv lösning för att förbättra precisionen på mätningen av andningsfrekvens

På bilden

Artikelnummer	Benämning	Slanglängd	Förpackningsstorlek
1202000	Respi-Check, vuxen, högkoncentrationsmask med andningsindikator och syrgasslang	2,1m	20
1216000	Respi-Check, vuxen, högkoncentrationsmask med andningsindikator		20
1292000	Respi-Check, barn, högkoncentrationsmask med andningsindikator och syrgasslang	2,1m	20

Förfrågan

Tänk på miljön innan du skriver ut dokumentet. Spara energi och papper genom att skriva ut dokumentet på båda sidor.



Intersurgical AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd, Sverige
T: 08-514 30 600 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



Tillverkaren Intersurgical Ltd är certifierad till ISO 9001:2015, ISO 13485:2003 och ISO 14001:2015



Distributören Intersurgical AB är certifierad till ISO 9001

IS10.7_SE • Issue 1 06.19