

Koppla in TrachSeal

Välj lämpligt system baserat på användningstid och om patienten har ET-tub eller trakealkanyl och välj storlek i tabellen nedan.

ET-tub	TrachSeal
● 5.0	F10
● 5.5	F10
○ 6.0	F12
○ 6.5	F12
● 7.0	F14
● 7.5	F14
● 8.0 och större	F16



Ta av det gröna lossningsverktöget från kopplingens kork.



Använd 22M/15F kopplingen för att ansluta TrachSeal mellan ET-tuben/trakealkanylen och andningssystemet. Vid behov använd den medföljande flexituben. Säkerställ att säkerhetsventilen är stängd om det är TrachSeal för 72 timmar som används.



Markera vilken dag som systemet skall bytas med hjälp av de klistermärken med förtryckta veckodagar som finns i förpackningen.

TrachSeal 24h

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek
● 3240003	Endotrakeal, vuxen	F10
○ 3240000	Endotrakeal, vuxen	F12
● 3240001	Endotrakeal, vuxen	F14
● 3240002	Endotrakeal, vuxen	F16
● 3240004	Trakeal, vuxen	F10
○ 3240005	Trakeal, vuxen	F12
● 3240006	Trakeal, vuxen	F14
● 3240007	Trakeal, vuxen	F16

TrachSeal 72h

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek
● 3720003	Endotrakeal, vuxen	F10
○ 3720000	Endotrakeal, vuxen	F12
● 3720001	Endotrakeal, vuxen	F14
● 3720002	Endotrakeal, vuxen	F16
● 3720004	Trakeal, vuxen	F10
○ 3720005	Trakeal, vuxen	F12
● 3720006	Trakeal, vuxen	F14
● 3720007	Trakeal, vuxen	F16

TrachSeal 72h, inkl ampuller med NaCl

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek
○ 3721000	Endotrakeal, vuxen	F12
● 3721001	Endotrakeal, vuxen	F14
● 3721002	Endotrakeal, vuxen	F16
○ 3721005	Trakeal, vuxen	F12
● 3721006	Trakeal, vuxen	F14
● 3721007	Trakeal, vuxen	F16


Sugning Gör så här

- Koppla sugslangen till suganslutningen på TrachSeal.
- Undertrycket i sugen bör ej överstiga 150 mmHg (20 kPa).
- Preoxygenera patienten före sugning i enlighet med lokala rutiner och föreskrifter.

Instruktionerna ovan utgår ifrån AARC clinical practice guidelines: Endotracheal Suctioning of Mechanically Ventilated Patients With Artificial Airways 2010.



På TrachSeal för 72 timmars användning öppnas systemet genom att vrida säkerhetsventilen så att de två pilarna pekar mot varandra.

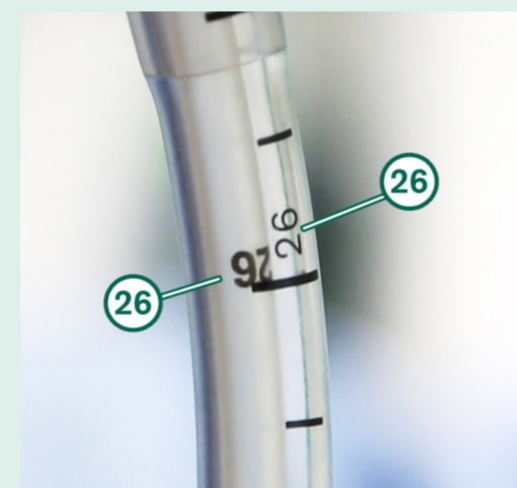

För varsamt fram sugkatetern tills siffrorna på ET-tuben och sugkatetern är i linje. Fortsätt därefter ytterligare två cm.



Tryck på sugreglaget för att påbörja sugning och dra långsamt sugkatetern bakåt i en rak rörelse. Tiden för sugning bör ej överskrida 15 sekunder.



Dra ut katetern tills den svarta markeringen blir synlig distalt från patienten och du känner ett klick.



Säkerställ att säkerhetsventilen är stängd om TrachSeal för 72 timmar används.

Rengöring av TrachSeal 72h



Ta bort korken på sköljporten och anslut en ampull eller spruta med NaCl. Tryck på sugreglaget för att aktivera sugen. Skölj tills sugkateterns spets är ren. Sätt på korken på sköljporten när du är klar.



Lås alltid sugreglaget när sugsystemet inte används. Det säkerställer att ventileringen av patienten inte riskeras genom oavsiktlig användning av sugen.

Koppla loss TrachSeal



Använd det gröna lossningsverktöget för att skonsamt koppla bort TrachSeal från ET-tuben/trakealkanylen. Kila in verktöget mellan ET-tuben och TrachSeal och tryck uppåt mot din tumme.

TrachSeal sorteras i enlighet med lokala riktlinjer för avfallshantering.



Övervaka patienten noggrant genom hela behandlingen och följ alltid gällande lokala instruktioner och riktlinjer från validerade källor, exempelvis Vårdhandboken.