



Återupplivnings slang för neonatalvård

med justerbart PEEP



Intensivvård • Andningssystem för intensivvård

Återupplivnings slang med justerbart PEEP för neonatalvård

Ett brett sortiment av 10 mm återupplivnings slangar för neonatalvård. Andningssystemen har en öppning på vinkelkopplingen mot patienten för att med fingerspetsen enkelt kunna ställa in önskat PEEP.

Luftflödet ställs in på apparaten enligt patientens maximala inspiratoriska behov. Även maximalt inspiratoriskt tryck ställs in på apparaten enligt klinisk bedömning. Önskat PEEP kan sedan ställas in genom att vrida det gröna reglaget lämpligt antal klick.

Andningssystemen har en praktisk vinkelkoppling (22M/15F) som passar alla maskar på marknaden. Kopplingen har dubbla swivlar för att underlätta positionering och säkerställa att masken sluter tätt mot patienten.

Andningssystemen kan användas på neonatalavdelningar och inom förlösningssvård med följande drivers och utrustning för återupplivning:

- Dräger®
- Hilrom Airshields
- GE® Datex-Ohmeda®, Giraffe®, Panda®
- Viamed Tom Thumb®
- Fisher & Paykel® Neopuff®

Andningssystemen finns i flera alternativa längder och med specifika kopplingar för att passa till många apparater samt olika typer av behov och scenarier.


Slanglängder

1.2m, 1.6m och 2.0m

Ger fler alternativ och möjligheter beroende på apparatur och andra specifika omständigheter

PEEP justeras med klick


Minimerar risken att PEEP ändras oavsiktligt under användning

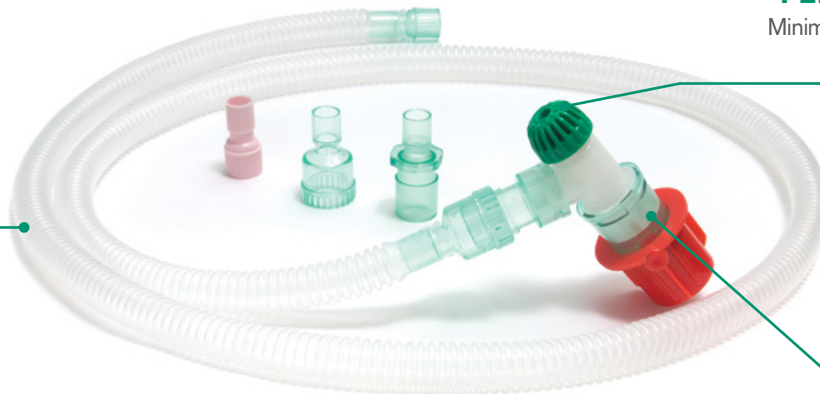

Praktisk koppling

Med dubbel swivel och koppling 22M/15F för att passa alla maskar

Förfrågan

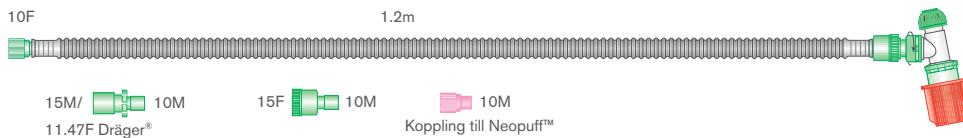

👁️ Produkten som syns på bilden

Artikelnummer	Beskrivning	Antal/förpackning.
6430005	Återupplivnings slang med justerbart PEEP, 10mm, till GE Giraffe®, dubbla swivlar, 1.6 m	15
6432000	Återupplivnings slang med justerbart PEEP, 10 mm, till Neopuff®, dubbla swivlar, 1.2 m	15
6432005	Återupplivnings slang med justerbart PEEP, 10 mm, till Neopuff®, dubbla swivlar, 1.6 m	10
6432001	10mm Flextube neonatal resuscitation breathing system with variable PEEP, double swivel elbow for Neopuff®, 2m	10
👁️ 6433000	Återupplivnings slang med justerbart PEEP, 10 mm, universalsystem med olika kopplingar för att passa flera olika apparater, dubbla swivlar, 1.2 m	15
6431008	Återupplivnings slang med justerbart PEEP och värmetråd för aktiv befuktning, 10 mm, inkl självpåfyllande befuktningsskammare, dubbla swivlar, 1.2 m	8

Dräger är ett av Drägerwerk AG & Co. KGaA registrerat varumärke. GE är ett av General Electric Company registrerat varumärke. Datex-Ohmeda, Inc., är ett företag inom General Electric. Datex-Ohmeda är ett av GE Healthcare Finland Oy registrerat varumärke. Giraffe and Panda är av Datex-Ohmeda, Inc. Registrerade varumärken Tom Thumb är ett registrerat varumärke av Viamed, Ltd. Fisher & Paykel är ett registrerat varumärke av Fisher & Paykel Healthcare Limited. Neopuff är ett registrerat varumärke av Fisher & Paykel Healthcare Limited.



Intersurgical AB Svärdvägen 3A182 33 Danderyd
Tel: 08-514 306 00 info@intersurgical.se www.intersurgical.se



The manufacturer Intersurgical Ltd is certified to ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 and ISO 14001:2015

Skriv bara ut om du behöver
Spara på papper och miljö.
Skriv ut dubbelsidigt om du måste skriva ut

IS1.9 SE • Issue 8 07.21